

JALKAHARJA IMUKUPPIKIINNITYKSELÄ
AV1709001688002

Käyttöohje



Helposti lattiaan imukupeilla kiinnitettävä jalkaharja, joka puhdistaa jalat nopeasti ja tehokkaasti ilman kumartumista.

Harja kiinnitetään lattiaan imukupeilla ja pesu tapahtuu jalkaa sandaalinmallisessa harjassa liikuttaen. Väri sininen. Harjakset nylonia, imukupit muovia, pidike PP-muovia. Paino 0,1 kg.

SEURAA KÄYTTÖOHJEITA HUOLELLISESTI:

1. Aseta jalkaharja imukuppi kiinnityksellä puhtaaseen kylpyammeeseen pohjalle tai suihkutilan lattialle
2. Aktivoi imukupit painamalla jalkaharjaa alaspäin jalallasi
3. Annostele nestesaippua harjaksille
4. Pidä kiinni tuesta tai istu kun liikuttelet jalkaasi jalkaharjassa
5. Liikuttele jalkaa edestakaisin muutamia kertoja... ja nauti!
6. Huuhtele ja toista toiselle jalalle
7. Pese jalkaharja jokaisen käytön jälkeen ja jätä se kuivumaan paikkaan, jossa se ei ole tiellä

Suositus:

Käytä jalkaharjaa istuen tai pidä kiinni tuesta jos haluat seistä. Älä käytä ihottumaiselle, vahingoittuneelle tai rikkiiniaiselle iholle.

Diabeetikolle:

Kysy jalkojenhoitajaltasi neuvoa tuotteen käyttöön.

Pesu:

Suosittellemme tuotteen puhdistusta kerran viikossa, vesispesu max 130 astetta.

LISÄTIEDOT JA TILAUKSET

Mediq Suomi Oy, PL 115, 02201 Espoo, Puhelin 020 112 1510
Faksi 020 112 1511, asiakaspalvelu@mediq.com, www.mediq.fi/apuvaline

