

Erikseen ostettavat tarvikkeet:

TESTILIUSKAT 72 KPL

- tuotenumero 25888
- kylmäsäilytys*
- hinta 220,57 €, sis. alv. 24 %
(177,88 € alv. 0 %)

*Kestää kuljetuksen huoneenlämmössä viikon verran, jonka jälkeen säilytys kylmässä.

LACTATE SCOUT -KONTROLLI

- tuotenumero 1025883
- hinta 81,48 €, sis. alv. 24
(65,71 €, alv. 0 %)

LANSETIT 200 KPL

PROLANCE HIGH FLOW 18G 1,8 MM

- tuotenumero 1230997
- hinta 31 €, sis. alv. 24 %
(25 €, alv. 0 %)

TULOS 10 SEKUNNISSA

Lactate SCOUT 4 -pikamittarilla mitataan veren laktaattipitoisuuden tipasta kapillaarivertä (0,2 ul), jonka saat helposti esimerkiksi sormenpäätä lansetin avulla. Mittarissa on iso näyttö ja helppokäyttöinen rullaohjain ja mittarin muistiin mahtuu 500 mittaustulosta.

Lactate SCOUT 4 -mittari huomioi mittauksessa myös lämpötilan, joten laitetta voidaan kuljettaa harjoittelussa mukana. Assistant-ohjelman avulla voit luoda oman optimaalisimman harjoitteluohjelmani helposti!

HELPPO KÄYTTÄÄ

- Ota testiliuska liuskapakkauksesta.
- Aseta liuska laitteeseen.
- Viritä lansetti pistovalmiiksi.
- Puhdista, desinfioi ja kuivaa sormenpää tai korvanlehti.
- Pistä puhdistettua kohtaa ja pyyhi ensimmäinen veripisara pois. Ota näyte toisesta pisarasta (älä purista).
- Vie Lactate Scout 4 -mittari lähelle veritippaa. Vältä ihon koskettamista testiliuskalla. Anna tarvittavan määrän verta imeytyä liuskaan.
- Tulos ilmestyy näytölle 10 sekunnin kuluessa.

TOIMITUSEHDOT:

www.mediq.fi/palvelut/asiakaspalvelu/toimitusehdot

Toimitamme tilaukset henkilöasiakkaille (asiakkaat, joilla ei ole Mediqin asiakasnumeroa) postiennakolla.

TEKNISET TIEDOT

Laite	Lactate SCOUT 4
Valmistaja	EKF Diagnostics
Mittaustapa	Ensymaattis-amperometrinen laktaatin mittaaminen kapillaariverestä
Mittausalue	0,5–25,0 mmol/l
Näytetilavuus	0,2 µl
Mittausaika	10 sekuntia
Mittauksen CV %	3–4 % riippuen hematokriitistä
Mittauslämpötila	+5 – +45 °C
Ilmankosteus	alle 85 % suhteellinen kosteus
Muisti	500 näytteelle
Mitat	91 x 46 x 21 mm
Paino	60 g pattereilla
Näyttö	LCD-näyttö
Virtalähde	2 x 1,5 paristo AAA/LR03
Liitännät	Sarjaportti 2.5" liitännällä Bluetooth-liitäntä



Katso lisätietoja: www.mediq.fi/lactatescout tai www.ekfdiagnostics.com/lactate-scout

Tuote on CE-merkitty lääkinällinen laite.



MARKKINOIJA SUOMESSA

Mediq Suomi Oy, Vuoritontunkuja 6, 02200 Espoo
Puhelin 020 112 1510, asiakaspalvelu@mediq.com, www.mediq.fi

