

GlucoMen[®] Day PUMP

Älykäs patch-
insuliini-
pumppu



Ei enää
päivittäisiä injektioita



www.glucomenday.se

A.MENARINI
diagnostics

Glucomen[®] Day PUMP



Kannettava, pieni ja kevyt

Kannettava, pieni ja kevyt GlucoMen Day PUMP -insuliinipumppu voidaan sijoittaa kehon eri osiin, jotta käyttö olisi joustavampaa ja miellyttävämpää tarpeittesi ja tottumustesi mukaan.

Glucomen Day PUMP on pieni, joten voit käyttää sitä huomaamattomasti vaatteiden alla ja liikkua vapaasti pyöristetyn muodon ansiosta, joka minimoi riskin, että se juuttuisi vaatteisiin.

■ Joustavuus ja vapaus

■ 49.5 x 39 x 14.5 mm

■ Nopea ja helppo sijoittaa

■ Painaa vain 26 g



Basal- ja boluskontrollointi

Glucomen Day PUMP -laitteen avulla voit hallita verensokeriasi säätämällä insuliinin saantiasi riippumatta siitä mitä olet tekemässä tai minne olet menossa

■ Nopealle tauolle

■ Urheilutoimintaan



Voidaan ohjata sovelluksen kautta


Voit helposti ohjata GlucoMen Day PUMP -laittasi suoraan älypuhelimestasi erillisen sovelluksen ansiosta, joka on vapaasti saatavilla sekä iOS- että Android-laitteille.

■ Käyttäjäystävällinen käyttöliittymä

■ Sinun ei tarvitse kantaa erillistä laitetta*



* Tarvittaessa saatavilla on myös erillinen ohjausyksikkö (ADM, Advanced Diabetes Manager).

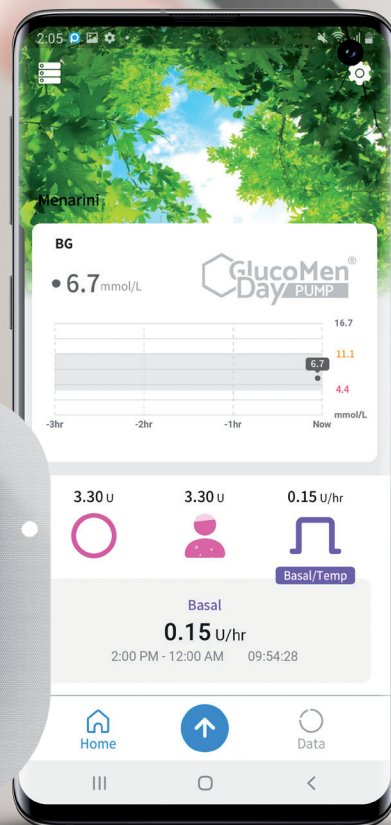



Letkuton ja vedenpitävä

Liikkumisvapaus ilman vöitä tai laukkuja eikä mitään huolta kierretyistä tai kuluneista letkuista, myös veden alla.

■ Ei ulkoista letkua

■ IPX8

■ Integroitu säiliö



3,5 päivän käyttö

Koska säiliöllä on suuri kapasiteetti (200 U insuliini), on mahdollista vaihtaa GlucoMen Day PUMP jopa vain kahdesti viikossa.

■ Helpompi kontrolli vaihtoihin

■ Säännöllisempi käyttö



Jaa pumppuhistoriasi

GlucoMen Day PUMP -laitteelta voit ladata pumpputietosi automaattisesti GlucoLog web -pilvialustaan ja analysoida verensokeritrendejä sekä GlucomenDay CGM -sensorilukemia.

■ Integroitu GlucoLog-pilvialustaan

■ Jaa tietoja terveydenhuoltohenkilöstön kanssa



GlucoMen[®] Day PUMP



Pumpun tekniset tiedot

Pumppu (Pod)

Käyttöaika: 3,5 päivää
IP (vedenpitävä ja pölytiivis luokitus): IP48
Koko: 49,5 x 39 x 14,5 mm
Paino: 26 g (ilman insuliinia)
Säiliö: 200 U (2 ml). Täytettävä on vähintään 80 U, jotta pumpun voi aktivoida
Verkko: Bluetooth Low Energy 5.0
Akku: 2 x A76 LR44 (1,5 V, 150 mAh)
Häilytyksen tyyppi: Tärinä (kuuluva)
Kanyyli & ohjainneula: Pehmeä kanyyli: FEP (fluorattu eteenipropreeni), halkaisija 0,64 mm, pystysuora työntö (syvyys 4,75 mm).
Neula: STS (ruostumaton teräs), 28 g
Pyrogeeniton: Vain nesteet
Käyttölämpötila: 4.4 – 37 °C
Lähtölämpötila: 10 °C tai korkeampi
Varastointilämpötila: 4.4 – 30 °C
Käyttö/varastointi suhteellinen kosteus: 20–85 %, tiivistymätön
Käyttö/varastointi ilmanpaine: 700–1 060 hPa

ADM-ohjausyksikkö

Koko: 116,5 x 64,5 x 11,4 mm
Paino: 108 g (akku mukaan lukien)
Tiedonsiirtotapa: Bluetooth Low Energy 4.2
Tiedonsiirtoetäisyys: 3 m
LCD: Kosketusnäyttö 3,5 tuumaa, HVGA (320 x 480) värillinen TFT
Akku: 3,7 V, 1130 mAh Li-Ion, ladattava
USB: Micro USB 5-nastainen, USB 2.0
Häilytystyyppi: kuuluva/näkyvä/värinä
Käyttölämpötila: 4,4–40 °C
Varastointilämpötila: -20 -60 °C
Käyttö/säilytys suhteellinen kosteus: 20 - 90 % RH, ei-kondensoituvaa
Käyttö/säilytys ilmanpaine: 700 - 1,060 hPa

Järjestelmäasetukset ja -asetukset

BASAALIANNOKSET

Annostusmäärä: 0,10 - 15,00 U/h (oletusarvo on 3 U/h)
Basaaliannoksen asetusalue: 0,10 - 15,00 U/h
Basaalihojelmat: Max. 8 (ADM) / 20 (Narsha-sovellukselle)
Basaaliannoksen suurentaminen: Säädetävissä 0,05 U/h välein (Oletusasetus: 0,05 U/h)

TILAPÄINEN BASAALIANNOS

Tilapäinen basaaliannos:
Säädetävissä (% tai U/h) 30 minuutista 12 tuntiin 30 minuutin välein.
8 (ADM:lle) / 20 (Narshallle). Oletus: Pois päältä

www.glucomenday.se

Markkinoija Suomessa



Mediq Suomi Oy
Vuoritontunkuja 6, 02200 Espoo
puh. 020 112 1510
asiakaspalvelu@mediq.com
www.mediq.fi

VERENSOKERITAVOITE (VS)

Asetettu aikaväli: Enintään 48 (Joka päivä 30 minuutin välein)
Tavoitealue: 3,9 - 11,1 mmol/l
Tavoite-VS & korjausarvo: 3,9 - 11,1 mmol/l; Tavoitearvoa (VS) voidaan säätää 0,1 mmol/l välein.
Korjausarvoa voidaan säätää myös 0,1 mmol/l välein

BOLUSASETUKSET

Hiilihydraattisyönnöt: 0 - 400 g
Hiilihydraattisuhte: 0 - 150 g hh/U
Korjauskerroin (insuliiniherkkyysskerroin): 0,1 - 22,2 mmol/l yksikköä kohti
Aktiivinen insuliini: Aikaväli: 2,0 - 8,0 tuntia, säädetävissä 30 minuutin välein.
Oletusasetus: 5.0 h
Verensokerin vähimmäisarvo boluslaskimessa: Alue: 2.8 - 3.9 mmol / l.
Oletusasetus: 3,9 mmol/l

BOLUSANNOSTELU

Boluksen annostelualue: 0,10 - 25 U (oletusasetus maksimibolukselle on 10 U)
Boluksen annosteluvaiheet: Vakioasetus 0,05 U/ Esiasetetut bolusannokset max. 8 (ADM:lle) / 20 (Narsha-sovellukselle)
Hiilihydraattien esiasetukset: enintään 36 (ADM:lle) / 20 (Narsha-sovellukselle).
Ruokakirjasto 971 (ruokaa ADM:lle)
Jatkettu bolus: 0,5 - 8 h 30 minuutin välein. Yhdistelmäbolus: Käytettävissä

Häilytykset, varoitukset ja muistutukset

Tukos: Häilytys, kun pumppu havaitsee, että insuliinin saanti on tukossa.
Tyhjä säiliö: Häilytys, kun pumpun säiliöstä on loppunut insuliini
Automaattinen sammutus: Häilytys, jos ADM/Narshan ja pumpun välillä ei ole yhteyttä. Ajalle 1-24 tuntia, säädetävissä 1 tunnin välein (oletusasetus: pois päältä)
Vajaa säiliö: 10-50 U säädetävissä 1 tunnin välein (vakioasetus: 10 U)
Pumpun viimeinen käyttöpäivä: 1 - 24 tuntia (säädetävissä 1 tunnin välein)

