

CareSens™ Air

Verensokerin jatkuvan seurannan järjestelmä

FI

PCGAB-000052 REV1 2025-08

Turvallisuustiedot

Sinun on luettava ja ymmärrettävä tässä luvussa luetellut käyttöaiheet, vasta-aiheet ja varoitukset ennen CareSens Air -järjestelmän käyttöä sekä noudatettava niitä tarkasti.

Käyttöaiheet

Jatkuvan glukoosiseurannan CareSens Air -järjestelmä (CareSens Air CGM -järjestelmä) tarkoitettu mittaamaan glukoosia kudосnesteestä vähintään 18-vuotiailla henkilöillä, joilla on diabetes. CareSens Air CGM -järjestelmän tarkoituksena on korvata tavanomainen verensokerimittaus diabeteksen hoitopäätöksiä tehtäessä, jollei muuta ilmene. CareSens Air CGM -järjestelmä auttaa havaitsemaan hyperglykemian ja hypoglykemian kaltaisia trendejä jatkuvasti tuottamansa verensokeritiedon avulla, hallitsemaan verensokeripitoisuuden muutoksia trendejä ja kaavamaisuuksia havaitsemalla sekä avustamaan diagnoosissa ja hoidossa pyydyttäessä hoitohenkilökunnan arviota.

Vasta-aiheet

- Poista sensori ennen röntgenkuvausta, magneettikuvausta, tietokonetomografiaa, radiotaajuusablaatiota, korkeataajuisia lämpöhoitoa tai magneettiohjattua kohdennettua ultraäänitutkimusta. Magneettikentät tai lämpö voivat vaurioittaa laitetta ja johtaa epätarkkoihin verensokerilukemiin tai hälytysvirheisiin.
- Tätä tuotetta ei ole arvioitu eikä hyväksytty seuraaville henkilöille:
 - pikkulapsille ja muille alle 18-vuotiaille
 - raskaana oleville ja imettäville naisille
 - dialyysipotilaille ja vakavasti sairaille potilaille.

Varoitukset

- Vaikea hypotensio tai sokki voi aiheuttaa mittauspoikkeamia. Tätä tuotetta ei saa käyttää potilaille, joilla on vaikeita oireita, sillä ketoasidoosi tai hyperosmolaarinen hyperglykeeminen ei-ketoottinen tila voi pienentää mittausarvoja epänormaaililla tavalla.
- Sensoria on käytettävä käyttöoppaan ohjeiden mukaan, ja se on kiinnitettävä käyttöoppaan osoittamaan kehonosaan.
- Pese kädet huolellisesti saippualla ja juoksevilla vedellä ja kuivaa ne ennen sensorin kiinnittämistä. Pyyhi sensorin kiinnityskohta iholla desinfiointipyyhkeellä ja kuivaa iho kunnolla. Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa infektiin.
- Älä käytä tätä tuotetta, jos sensorin pakkaus on vaurioitunut tai avattu. Tällaisen tuotteen käyttö voi johtaa infektioon.
- Älä käytä vaurioitunutta tai viallista sensoria. Tällaisen tuotteen käyttö voi johtaa infektioon.
- Kiinnitä sensori olkavarren takaosaan. Sensori ei välttämättä toimi oikein, jos se on kiinnitetty muuhun kehonosaan.
- Sensori on kiinnitettävä heti asetinpakkauksen avaamisen jälkeen, jotta se ei kontaminoidu ilman kautta.
- Poista asettimen suojakorkki vasta kun olet valmis kiinnittämään sensorin. Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa infektiin, joka johtuu bakteereille altistumisesta.
- Kun olet poistanut asettimen suojakorkin, varo suuntaamasta asetinta muita ihmisiä kohti.
- Paina asettimen vapautuspainiketta vasta kun olet valmis kiinnittämään sensorin.
- Jos käytät insuliinipumpputa, kiinnitä sensori vähintään 8 cm:n päähän siitä.
- Jos sensorin anturiosa rikkoutuu tai irtoaa sensoria kiinnitettäessä, tarkista, onko anturiosaa jäänyt ihon alle. Jos et näe anturiosaa paljaalla silmällä, käänny lääkärin puoleen. Jos sensorin kiinnityskohdan infektio aiheuttaa tulehduksen, punoitusta, turvotusta tai kipua, käänny terveydenhoidon ammattilaisen puoleen.
- Jos sensorin kiinnityskohdassa ilmenee mustelmia tai voimakasta verenvuotoa, lopeta sensorin käyttö ja poista sensori. Ota sitten heti yhteys lääkäriin tai muuhun terveydenhoidon ammattilaiseen.
- Jos sensoria kiinnitettäessä ilmenee verenvuotoa tai jos sensori on kiinnitetty väärin tai jos mittaustulokset ovat poikkeavia, irrota sensori ja kiinnitä se toiseen kohtaan.
- Kiinnitä uusi sensori aina eri kohtaan. Uusien sensorien kiinnittäminen aiemmin käytettyyn kohtaan voi aiheuttaa ihoärsytystä tai arpeutumista.
- Sisäänvientikohdan on täytettävä seuraavat kriteerit:
 - Kohta on vähintään 8 cm:n etäisyydellä insuliinipumpun letkun ja infuusioletkun sisäänvientikohdasta.
 - Kohta ei saa olla lähellä vaatetuksen vyötärönauhaa, tatuointia, luuta, arpea tai ärtynyttä ihoa.
 - Kohta ei ole altis törmäyksille tai iskuille, eikä se saa jäädä painuksiin allessi nukuessaasi.
- Sensorin kiinnitykseen käytettävä ihoiteippi ja ohjainneulat, joiden avulla

- sensori viedään paikoilleen, voivat aiheuttaa joillekin käyttäjille allergisia reaktioita (punoitusta tai turvotusta) tai kutinaa. Jos näin käy, poista kiinnitysteippi ja/tai sensori heti ja kysy neuvoa lääkäriltä tai muulta terveydenhoidon ammattilaiselta.
- Pidä pakkauksessa oleva kuivausaine poissa lasten ulottuvilta.
- Älä syö pakkauksessa olevaa kuivausainetta.
- Jos kuivausainetta joutuu silmiin, huuhtelee silmät heti perusteellisesti juoksevilla vedellä. Ota yhteys lääkäriin, jos havaitset ongelmia.
- Sensorin nieleminen voi aiheuttaa tukehtumisen. Valvathan, etteivät lapset kosketa sensoria.
- CareSens Air -järjestelmällä saadut verensokerilukemat eivät korvaa terveydenhoidon ammattilaisen hoitoa, eikä niitä voi käyttää diabeteksen diagnosointiin. Glukoositietojen tarkoitus on vain auttaa potilasta hallitsemaan diabetestaan ja avustaa terveydenhoidon ammattilaisia diagnosoinnissa ja hoidossa.
- Jos järjestelmän ilmoittama verensokeripitoisuus ei mielestäsi kuvasta tarkoin oireitasi, tarkista tilanne heti verensokerimittarilla ja päätä hoidosta sen mukaan. Tee hoitotoimi tai noudata lääkärin ohjeita.
- Huomioi sensorin mahdollinen suorituskyvyn vaihtelu erityisesti alkuvaiheessa sensorin kiinnittämisen jälkeen.
- Älä tee hoitopäätöksiä lukemien perusteella, jos et pysty tarkistamaan verensokeria reaaliaikaisesti (esimerkiksi sensorin lämpiämisen aikana, järjestelmävirheen ilmetessä tai jos verensokeripitoisuuden trendinuolen sijaan näytössä on "...") tai jos senhetkinen verensokeriarvo ei vastaa oireitasi tai odotuksiasi. Käytä hoitopäätösten tekemiseen tällöin verensokerimittaria
- Potilasta hoitavien henkilöiden ei pidä tehdä hoitopäätöksiä Sens365-sovelluksesta saatavien tietojen perusteella. Potilasta hoitaville henkilöille välitetyt verensokeritiedot voivat saapua viiveellä eivätkä ole reaaliaikaisia; siksi ne eivät sovellu hoitopäätösten tai -toimien perusteeksi. Näihin verensokeritietoihin kuuluvat myös matalan tai korkean verensokeripitoisuuden hälytykset, jotka lähetetään potilasta hoitaville henkilöille. Hoitopäätöksen tulee aina perustua vain käyttäjän sovelluksen näyttämään reaaliaikaiseen tietoon, ei potilasta hoitavan henkilön sovelluksen tietoihin.
- Jos sensorin lukemat eivät mielestäsi kuvasta terveydentilaasi tarkoin, voit säätää lukemia verensokerimittarin avulla.
- Älä kalibroi, jos verensokeripitoisuus vaihtelee nopeasti (0,1 mmol/L (2 mg/dL) tai enemmän minuutissa). Tämä voi vaikuttaa sensorin tarkkuuteen.
- Kalibrointiin saa käyttää mittaustulosta vain sormenpäästä, ei muista kehonosista (kuten kämmenestä tai kyynärvarresta). Tulos saattaa poiketa sormenpäämittauksen tuloksesta, mikä voi vaikuttaa sensorin glukoosilukemien tarkkuuteen.
- Jos sormenpäälukema on alle 0,6 mmol/L (10 mg/dL) tai yli 33,3 mmol/L (600 mg/dL), sitä ei voi käyttää kalibrointiarvona.
- Jos kalibrointiarvo on epätarkka, CareSens Air ei pysty antamaan tarkkoja glukoosilukemia. Jos huomaat, että sensorin lukemat kalibroinnin jälkeen eivät kuvasta terveydentilaasi tarkoin, älä tee hoitopäätöksiä CareSens Air -järjestelmän perusteella.
- Asianmukaisten hoitopäätösten helpottamiseksi säädä hälytysten tämänhetkisiä asetuksia helpommin tunnistettaviksi ja tarkista laitteen näyttö usein kaikkien hälytysten huomaamiseksi.
- Varmista, että älylaitteesi ääni on riittävän kovalla eikä sitä ole mykistetty. Hälytykset eivät kuulu, jos äänet eivät ole käytössä.
- Jos olet yhdistänyt älylaitteeseesi jonkin muun äänilaitteen (kuten kuulokkeet), hälytykset kuuluvat vain tuon yhdistetyn laitteen kautta, eivät älylaitteen kaluttimen kautta. Varmista, että yhdistämäsi laite sallii hälytysten vastaanottamisen.
- Kun älylaitteen tai sovelluksen ilmoitusäänet on mykistetty, myös hälytysääni tai -värinä jää pois. Hälytykset näkyvät kuitenkin edelleen älylaitteen näytöllä.
- Poista älylaitteesi automaattiset käyttöjärjestelmän päivitykset käytöstä ja tee päivitykset aina manuaalisesti. Jotkut käyttöjärjestelmän ominaisuudet saattavat vaikuttaa CareSens Air -sovelluksen asetuksiin ja mahdollisuuteesi saada hälytyksiä. Tarkista käyttöjärjestelmän päivityksen jälkeen aina laitteen asetukset varmistaaksesi, että CareSens Air -sovellus toimii kunnolla.
- CareSens Air -sovelluksen tiedot voidaan menettää, jos niitä ei ladata pilvipalvelimeen.
- Jos poistat älylaitesovelluksen sensorin käytön aikana, kaikki sovelluksen tallentamat tiedot menetetään. Jos sinun on poistettava sovellus tai vaihdettava toiseen älylaitteeseen, lataa kaikki tärkeät tiedot pilvipalvelimeen ja tallenna varmuuskopiotiedosto erilliseen tallennuslaitteeseen.
- Laitteessa on nappiparisto. Nielaisu liitumnappiparisto voi aiheuttaa vaikeita ja jopa kuolemaan johtavia vammoja jo kahden tunnin kuluessa. Pidä paristot poissa lasten ulottuvilta. Jos epäilet, että joku on saattanut nielaissut pariston tai että paristo on muulla tavoin päätnyt kehon sisään, hakeudu heti lääkäriin.

Riskit ja hyödyt

Riskit

CareSens Air CGM -järjestelmän käyttöön liittyvät riskit:

- Et huomaa hälytyksiä
- Kiinnittymisreaktiot
- Jumiutunut tunnistusosa
- Epäasianmukaiset hoitopäätökset

Hälytysten jääminen huomaamatta

Jotta CareSens Air CGM -järjestelmän hälytykset eivät jää huomaamatta, älylaitteesi on noudatettava i-SENS:n suosittelemia asetuksia. Lisätietoja on CareSens Air -sovelluksessa kohdassa **Asetukset > Tutoriaalit**. Katso lisätietoja käyttöoppaan kohdista "Suositellut älylaitetta koskevat vaatimukset", "Hälytysten käyttö" ja "Usein kysytyt kysymykset (UKK)".

Kiinnittymisreaktiot

CareSens Air CGM -järjestelmässä käytettävät ihon kiinnitysteipit ja sensoriteipit ovat läpäisseet biologisen yhteensopivuustestin. Kiinnittymisreaktiot ovat lieviä tai niitä ei esiinny useimmissa tapauksissa. Joillakin kliiniseen tutkimukseen osallistuneilla henkilöillä esiintyi jonkin verran punoitusta ja turvotusta, mutta ne eivät muodostaneet suurta lääketieteellistä riskiä. Jos oireet jatkuvat, ota yhteyttä terveydenhuollon ammattilaiseen.

Jäännösriskit

CareSens Air -sensorin tunnistusosa ei todennäköisesti rikkoudu tai irtoa ja jää ihon alle, kuten ei koskaan tapahtunut kliinisissä tutkimuksissa. Ihon alle jätetyt steriloidut tunnistusosat eivät yleensä muodosta merkittävää lääketieteellistä riskiä. Jos tunnistusosa rikkoutuu tai irtoaa ja pysyy ihon alla ja siinä näkyy infektion tai tulehduksen merkkejä, ota yhteys terveydenhuollon tarjoajaan tai lähimpään valtuutettuun jälleenmyyjään.

Epäasianmukaiset hoitopäätökset

Käyttäjät voivat tehdä hoitopäätöksiä CareSens Air -järjestelmän avulla. Jos hoitotoimia tehdään tilanteissa, joissa hoitopäätöksiä ei olisi pitänyt tehdä, riskinä on vaaralliset seuraukset; käyttäjä voi esimerkiksi saada insuliinia kaksinkertaisen annoksen tai muuten liikaa. Jotta tällaisilta tilanteilta vältytään, tutustuthan käyttöoppaan kohtiin "Turvallisuustiedot" ja "4 Hoitopäätökset" ennen minkäänlaisten hoitopäätösten tekemistä.

Hyödyt

CareSens Air CGM -järjestelmän käytön etuja ovat:

- hälytysten vastaanottaminen korkeista ja matalista verensokeritasoista hyper- ja hypoglykemian havaitsemiseksi
- verensokerisuuntausten ja -mallien seuranta parempaa diabeteksen hallintaa varten.
- Vähemmän vaivaa sormenpäämittauksista

Trendien ja mallien seuranta

CareSens Air CGM -järjestelmä auttaa havaitsemaan hyperglykemian ja hypoglykemian antamalla jatkuvasti tietoa verensokerista, mikä auttaa hallitsemaan muutoksia verensokeritasoissa analysoimalla suuntauksia ja malleja, rohkaisemaan tekemään parempia päätöksiä ruuan ja liikuntatottumusten suhteen sekä avustamaan diagnoosissa ja hoidossa konsultoimalla hoitohenkilökunnan kanssa.

Pysyminen ajan tasalla

Jos sinulla on diabetes, on erittäin tärkeää hallita verensokeritasojasi reaaliaikaisesti. CareSens Air CGM -järjestelmä käyttää hälytyksiä ilmoittaakseen, kun verensokeritasosi on liian korkea tai liian matala tai muuttuu nopeasti. Hälytysten avulla voit hallita diabetestasi paremmin.

Vähemmän vaivaa sormenpäämittauksista

Voit tehdä hoitopäätöksiä CareSens Air -järjestelmän avulla. Järjestelmällä voi korvata verensokerimittarin tarvittavat verinäytteen otot sormenpäästä – mikä vähentää käyttäjälle koituvaa kipua ja vaivaa – kunhan oireet ja jatkuvan verensokeriseurannan arvot vastaavat toisiaan. Lisätietoja tapahtumista saat käyttöoppaan kohdasta "4 Hoitopäätökset".

CareSens Air -järjestelmän ymmärtäminen

⚠ Varoitus

CareSens Air CGM -järjestelmästä saadut verensokerilukemat eivät voi korvata ammattimaista lääketieteellistä hoitoa. Ne on tarkoitettu vain antamaan potilaalle tietoja verensokeritason muutoksista diagnoosin ja hoidon helpottamiseksi konsultoinnissa terveydenhuollon ammattilaisen kanssa.

Käytön merkitys

Tavanomaiset verensokerimittarit mittaavat verensokeritasoja tiettyinä aikoina, eivätkä ne osoita, miten taso muuttuu, eivätkä anna yleiskatsauksen verensokeritason muutoksista ajan myötä. CareSens Air CGM -järjestelmää käytetään kuitenkin diabeteksen hallintaan mittaamalla jatkuvasti kudосnesteiden verensokeritasoja ja antamalla käyttäjälle tietoja verensokeritason muutosten suuntauksista.


Jatkuva verensokerin seuranta laskee verensokeripitoisuuden mittaamalla interstitiaalisen nesteen verensokeripitoisuuden. Kuitenkin, kun verensokeripitoisuus muuttuu, interstitiaalisen nesteen verensokeripitoisuus muuttuu noin 5–15 minuuttia myöhemmin.

Tuotteen osat

CareSens Air -sensori on tarkoitettu vain kertakäyttöön. Kun se on kiinnitetty, sensoria ei voi käyttää uudelleen. Pakkauksen sisältö on seuraavanlainen. Varmista, että kaikki sisältö on mukana ennen pakkauksen avaamista.

⚠ Varoitus

- Tuotetta ei saa käyttää, jos sensorin pakkaus on vaurioitunut tai avattu. Tämä voi johtaa infektiin.
- Pidä pakkaukseen sisältyvä kuivausaine poissa pikkulasten tai lasten ulottuvilta.
- Älä syö pakkauksessa olevaa kuivausainetta.
- Jos kuivausaineen sisältöä joutuu silmiin, pese silmät heti huolellisesti juoksevilla vedellä. Ota yhteys lääkäriin, jos sinulla on ongelmia.

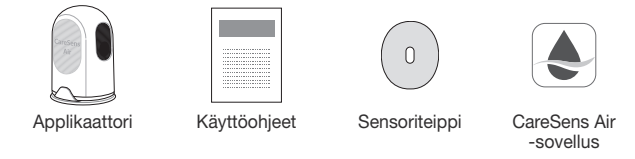

🔍 Huomautus

- Sensori on applikaattorin sisällä.
- Sensorin kiinnitysteippi voi vaihdella valmistusajankohdan ja valmistusolosuhteiden mukaan.

Applikaattori

Applikaattoria käytetään sensorin suojaamiseen ja sensorin kiinnittämiseen ihoon.

🔍 Huomautus

- Applikaattori on kertakäyttöinen, eikä sitä voi käyttää uudelleen.
- Älä paina vapautuspainiketta, ennen kuin olet poistanut applikaattorin suojakorkin ja olet valmis kiinnittämään sensorin.



Applikaattorin osissa käytetään seuraavia nimiä:


Nimi	Toiminto
Suojakorkki	Tämä estää sensorin tahattoman vapautumisen.
Vapautuspainike	Kun tätä painiketta painetaan, sensori vapautuu ja kiinnittyy käyttäjän kehoon.

Sensori

Sensori mittaa verensokeritasoja ja lähettää lukemat älylaitteeseen.

🔍 Huomautus

- Sensori on vesitiivis. Tuote on testattu vedenpitäväksi 24 tunnin ajan ja 1 metrin syvyydessä.
- Varo, etteivät halkaisijaltaan alle 1,0 mm:n kiinteät esineet pääse sensorin sisään.
- Älylaite ja sensori on pidettävä 6 metrin etäisyydellä toisistaan. Jos älylaitteen ja sensorin välillä on nestettä tai este, tiedonsiirtoalue voi lyhentyä.
- Sensori on käytettävissä 15 päivän ajan sen kiinnittämisen jälkeen. Vanhentumispäivämäärää edeltävä hälytys aktivoituu.
- Irrota sensori viimeistään sen vanhentumispäivänä.

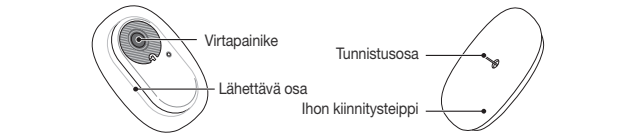

Seuraavassa taulukossa esitetään sensorin eri osien nimet ja toiminnot.

Nimi	Toiminto
Virtapainike	Kytkee sensorin virran päälle.
Lähettävä osa	Siinä on sisäänrakennettu akku ja se siirtää tunnistusosan kautta mitatun verensokeripitoisuuden käyttäjäsovellukseen.
Ihon kiinnitysteippi	Kiinnittää sensorin käyttäjän ihoon.
Tunnistusosa	Mittaa käyttäjän verensokeritasoja.

CareSens Air -sovellus

Käyttäjä voi seurata sensorilla mitattuja verensokerilukemia älylaitteen CareSens Air -sovelluksessa. Sovelluksessa näytettävien verensokerin suuntausnuolien, verensokerin suuntausten, tapahtumien ja kalibrointiarvojen avulla voit hallita verensokeria tehokkaammin.

Sinun tulee rekisteröityä ja kirjautua sisään, jotta voit ladata CareSens Air -sovellukseen tallennetut tiedot pilvipalvelimelle. Jos olet kirjautunut sisään CareSens Air -sovellukseen, voit ladata varmuuskopiotiedot, vaikka kadottaisit älylaitteesi.

Symbolien määritelmät

Seuraavassa taulukossa on lueteltu IEC:n (International Electrotechnical Commission) määrittämien lääketieteellisten käytäntöjen sähkölaitteiden graafiset symbolit. Nämä symbolit antavat lisätietoa tuotteesta ja sen käytöstä sekä turvallisuudesta.

Symboli	Kuvaus
CE	CE-merkintä
EU REP	Valtuutettu edustaja Euroopan yhteisössä / Euroopan unionissa
MD	Lääkinnällinen laite
!	Huomio
⊗	Ei saa käyttää uudelleen
📖	Katso lisätietoja käyttöoppaasta
📖	Tutustu käyttöohjeisiin tai sähköisiin käyttöohjeisiin
🚶	Tyypin BF liityntäosa
☀️	Suojattava auringonvalolta
☔	Säilytettävä kuivana
⚡	SEKK (sähkö- ja elektroniikkalaiteromu)
🔥	Lämpötilaraja
🌡️	Kosteusrajoitus
🌬️	Ilmanpainerajoitus
⊗	Ei saa käyttää, jos pakkaus on vaurioitunut, ja katso käyttöohjeet
IP	Suojausaste vierasmateriaalin tai veden sisäänpääsyä vastaan
STERILE	Steriloitu eteenioksidilla
🔒	Yksittäinen steriiliestejärjestelmä, jossa on suoja pakkaus ulkopuolella
🏭	Valmistaja
🌐	Maahantuoja
LOT	Eräkoodi
SN	Sarjanumero
⌚	Viimeinen käyttöpäivämäärä

i-SENS, Inc.
43, Banpo-daero 28-gil
Seocho-gu, Seoul 06646
Republic of Korea
CareSensAir.com

EU REP Medical Technology Promedt Consulting GmbH
Ernst-Heckel-Straße 7
66386 St. Ingbert, Germany

CE 0123 MD

© 2025 i-SENS, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöohjeet

1. Sovelluksen asentaminen ja tilin rekisteröiminen

Etsi ja asenna CareSens Air sovelluskaupasta tai sekä rekisteröi tili.

Huomautus

CareSens Air -sovelluksen lataaminen

Voit ladata CareSens Air -sovelluksen kirjoittamalla linkin selaimeesi tai skannaamalla QR-koodin.

https://www.caresensair.com/content/download_03



1 Käynnistä CareSens Air -sovellus älylaitteessasi ja valitse Luo tili.

- Anna sähköpostiosoite, jolla haluat rekisteröityä, ja napauta **Lähetä**. Vahvistuskoodi lähetetään rekisteröinnin yhteydessä antamaasi sähköpostiosoitteeseen. Viimeistelevahvistus antamalla kuusinumeroinen koodi.

Huomautus

Koodi on annettava viiden minuutin sisällä sähköpostin lähettämisestä. Napauta **Lähetä uudelleen**, jos et anna koodia aikarajan sisällä.

- Anna käyttäjätiedot ja napauta **Ok**.

2. Sensorin yhdistäminen

Yhdistä sensori älylaitteeseen skannaamalla pakkausmerkinnöissä oleva viivakoodi.

2 Käynnistä CareSens Air -sovellus älylaitteessasi ja kirjaudu sisään. Valitse Turvallisuustiedot > Lue "Turvallisuustiedot" > Skannaa sensorin tiedot.

3 Skannaa sensorin pakkausmerkinnöissä oleva viivakoodi tai syötä manuaalisesti sarjanumeron neljä viimeistä numeroa ja kuusinumeroinen PIN-koodi.

Huomautus

- Vanhentuneita antureita ei voi käyttää. Tarkista viimeinen käyttöpäivä ennen käyttöä.
- Varmista, että syötät sensorin pakkausmerkinnöissä ilmoitetut tiedot oikein. Sensorin yhdistäminen ei onnistu, jos annat väärän sarjanumeron tai PIN-koodin.

4 Tutustu sensorin kiinnittämistä koskeviin ohjeisiin ja valitse sitten Aloita laiteparin muodostus.

3. Sensorin kiinnittäminen

Kiinnitä sensori käsivarteen ja paina virtapainiketta. Odota, kunnes sensorin liitäntä on valmis.

5 Avaa CareSens Air -sensorin pakkaus. Ota applikaattori pakkauksesta ja aseta se tasaiselle, vakaalle pinnalle.

6 Pidä kiinni applikaattorista ja irrota suojakorkki.









7 Poista suojakorkki ja aseta applikaattori kuvan mukaisesti käsivarren takaosaan sensorin kiinnityskohtaan.

8 Paina applikaattorin vapautuspainiketta. Applikaattorin sensori kiinnitetään käsivarren takaosaan.

9 Poista applikaattori ja varmista, että sensori on kiinnitetty oikein.

10 Paina virtapainiketta, kunnes se naksahtaa. Painike painuu sitten sisäänpäin. Odota, kunnes sensorin liitäntä on valmis.

- Mikäli verensokerin jatkuvan seurannan CareSens Air -järjestelmän käytössä ilmenee vakava haittatapahtuma, tee ilmoitus valmistajalle ja maasi asianomaiselle viranomaiselle.
- i-SENS, Inc. on laatinut tämän käyttöoppaan tiedot huolellisesti mahdollisimman paikkansapitäviksi. i-SENS ei ole kuitenkaan vastuussa käyttöoppaan virheistä tai puutteista. i-SENS voi muuttaa tässä käyttöoppaassa kuvattua tuotetta tai siihen liittyviä ohjelmistosovelluksia ilman ennakkoilmoitusta parantaakseen tuotteen luotettavuutta, ominaisuuksia tai suunnittelua.
- Tämä asiakirja on suojattu tekijänoikeuksilla. Tämän käyttöoppaan kopioiminen tai muuttaminen on ehdottomasti kielletty ilman i-SENSiltä etukäteen saatua suostumusta.

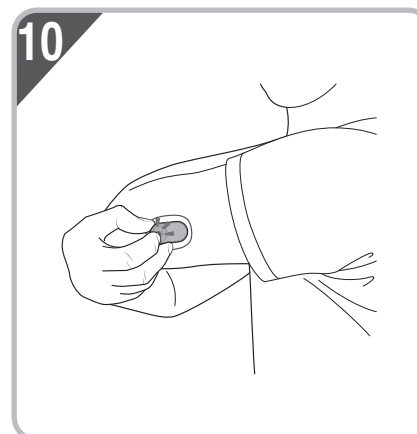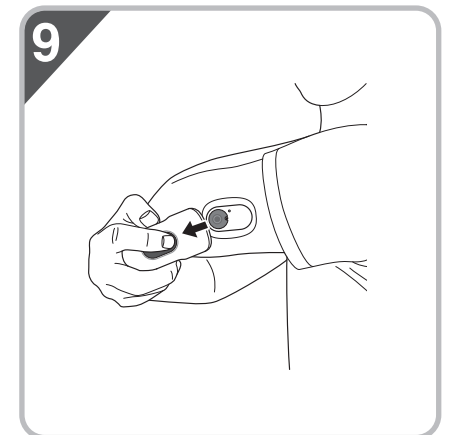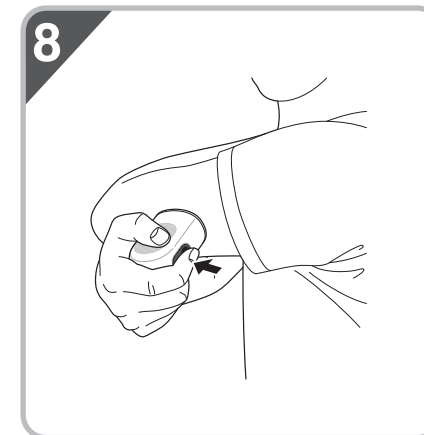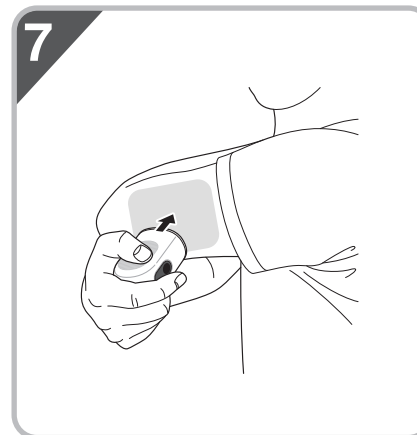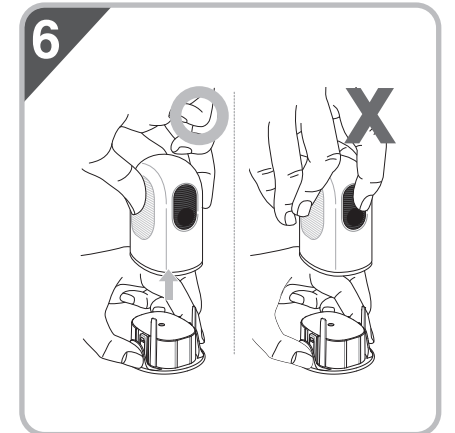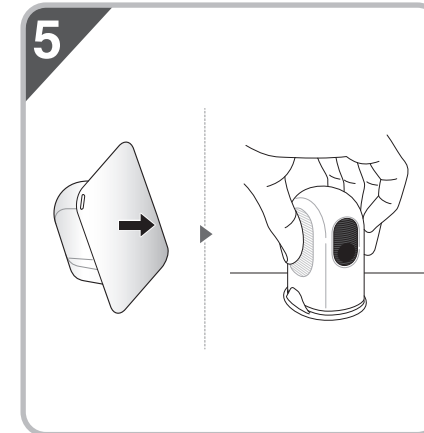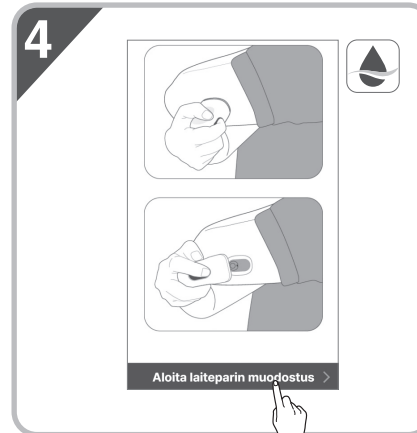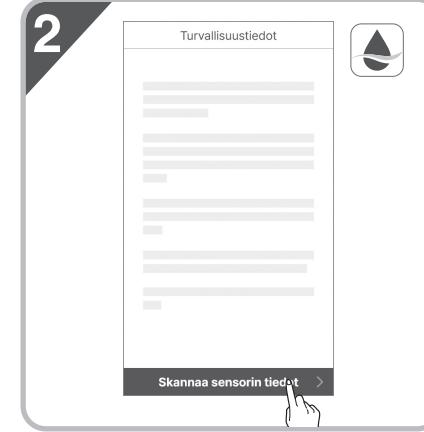

Lataa käyttöohjeet

Lataa CareSens Air -käyttöopas kirjoittamalla linkki selaimeesi tai skannaamalla alla oleva QR-koodi. Lisätietoja vianmäärityksestä saat lähimmältä valtuutetulta jälleenmyyjältä.



<https://caresensair.com/download>