

CareSens™ N



Verensokerin mittausjärjestelmä lähikosketuksella / Blodglukosmätsystem med närfältskommunikation














NFC
NFC-lähikosketus / NFC-närfältskommunikation








SmartLog App
Maksuton lataus / Gratis nedladdning



Android
Älypuhelin / Smartmobil

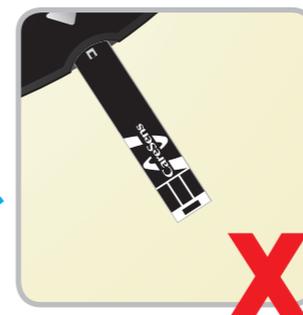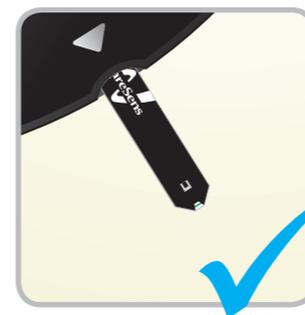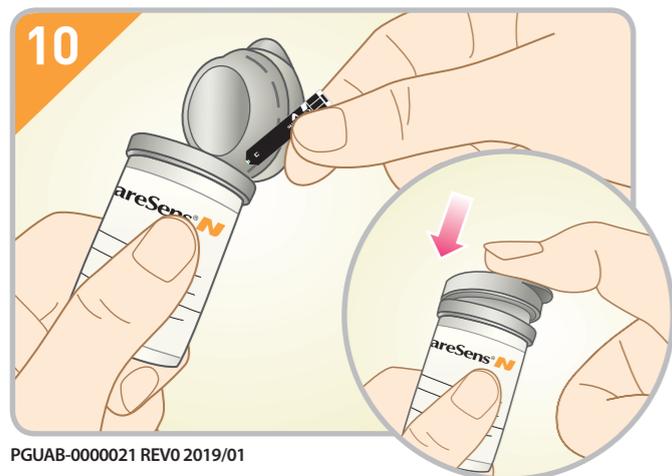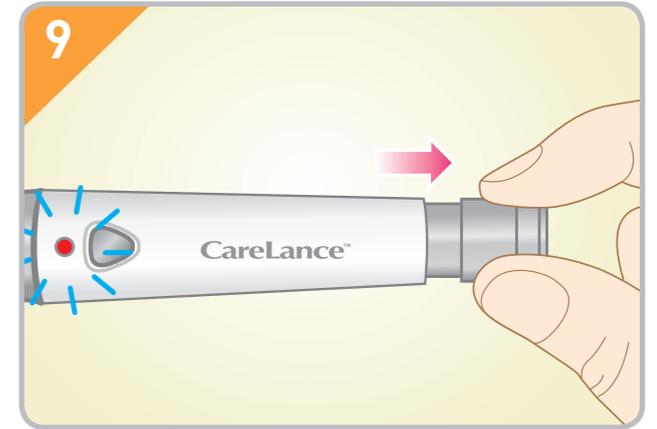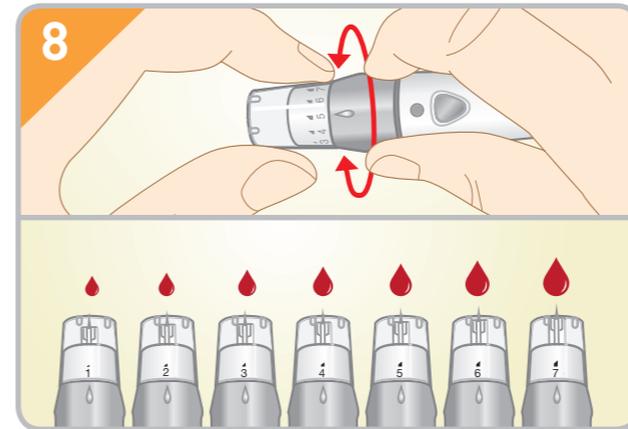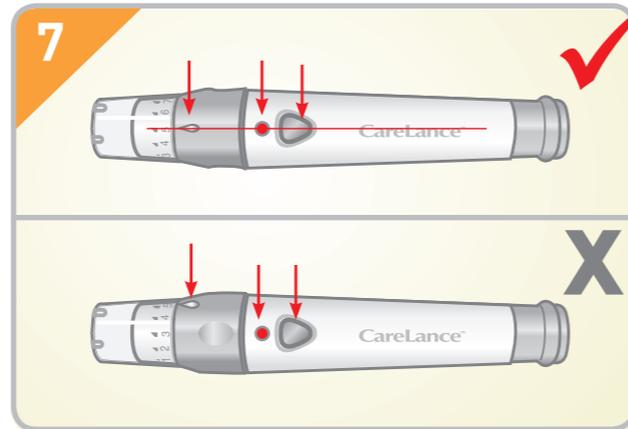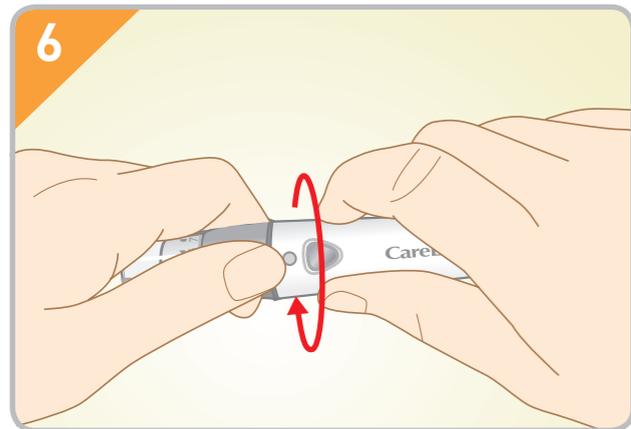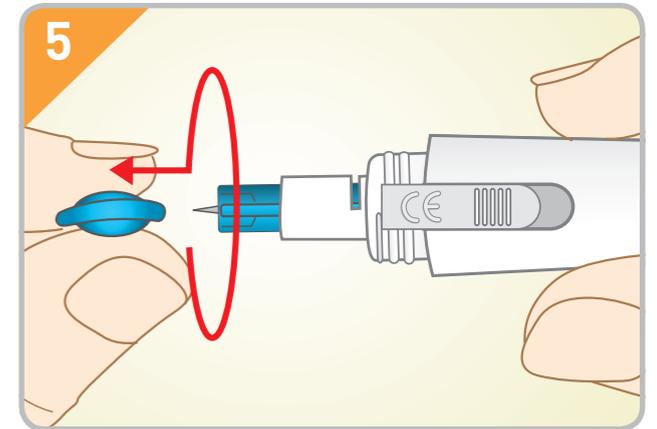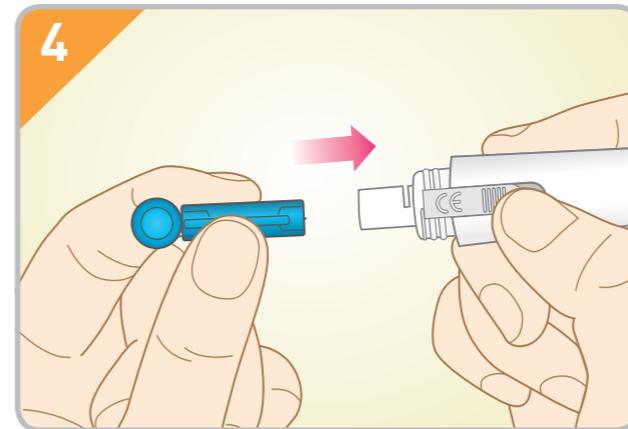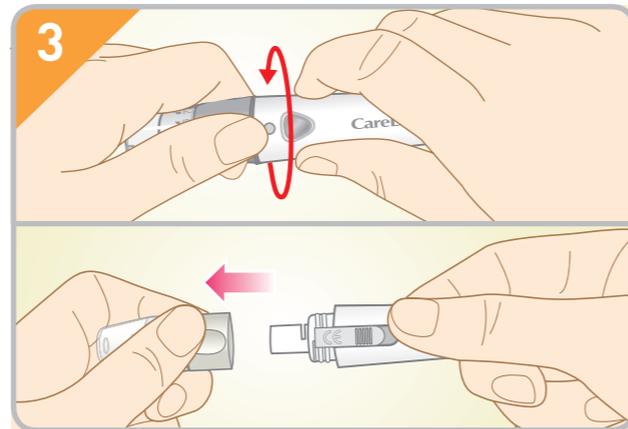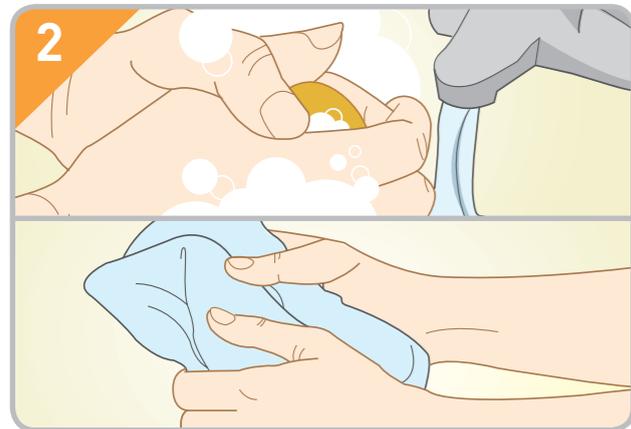

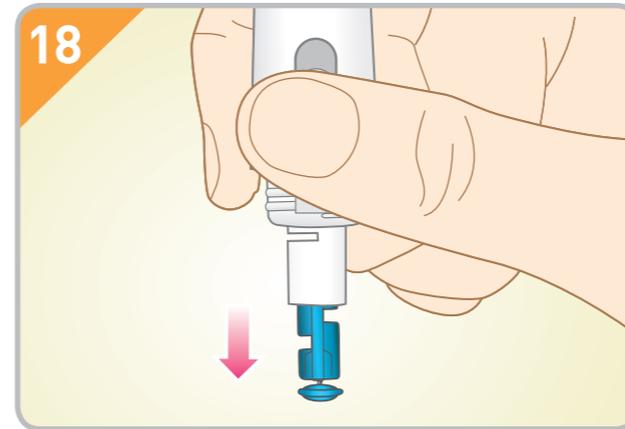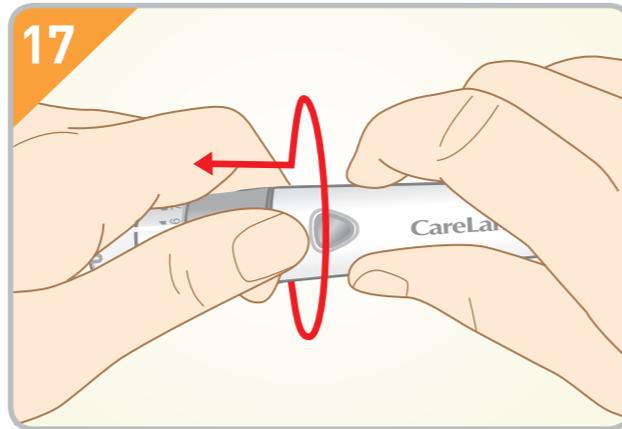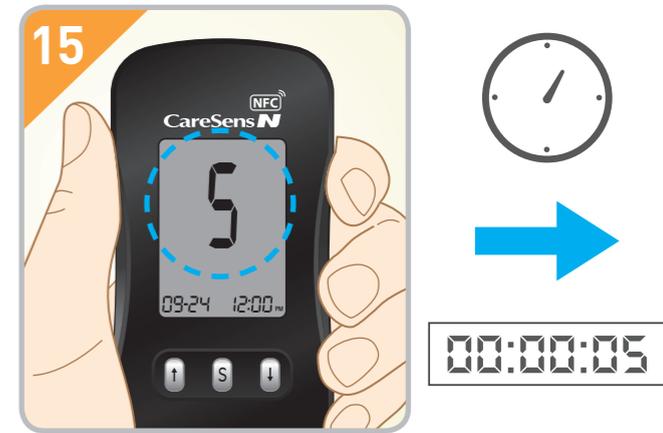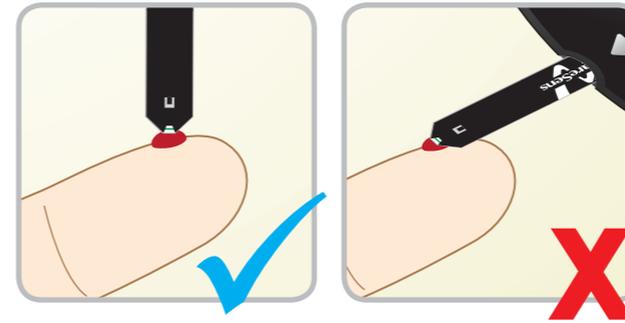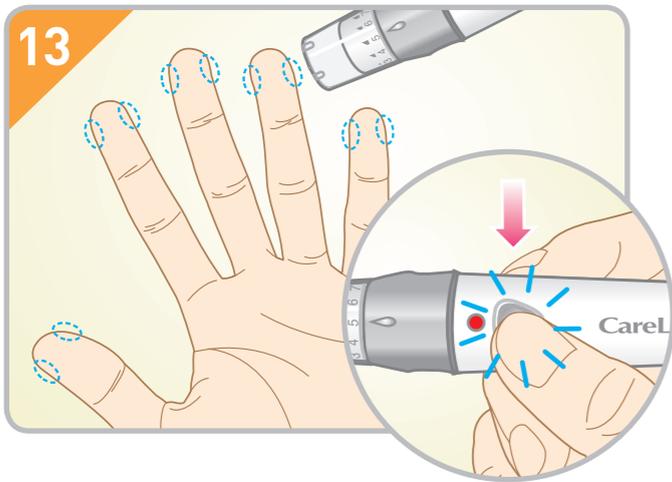

① Asenna SmartLog-sovellus älypuhelimiesi. / Install SmartLog-app på din smartmobil.
 Voit helpottaa sovelluksen latausta QR-koodilla. / Det kan vara enklare att ladda appen med QR-kod.



② NFC-yhdistä mittari älypuhelimiesi takaosaan. / NFC-anlut din mätare till din smartmobils baksida.



③ SmartLog käynnistyy automaattisesti puhelimessasi. / SmartLog startas automatiskt på din mobil.



④ Hallitse verensokeriasi käyttäen SmartLogin erilaisia ominaisuuksia. / Hantera din blodsocker med olika funktioner i SmartLog.



NFC-antenni mittarin takana. / NFC-antenn på baksidan av mätaren.



Näin NFC-yhdistät mittarisi älypuhelimiesi. / Så här kan du NFC-anluta din mätare till din smartmobil.



Verensokerin seuranta SmartLogilla / Glukosförvaltning med SmartLog