


SINUSCAN 201 Snabb Instruktioner

Scanning med Sinuscan 201:

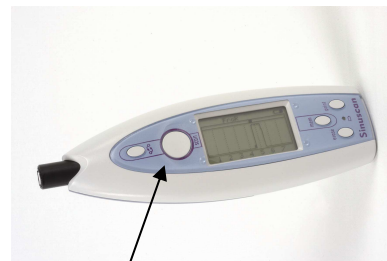

SCAN

- Sätt en liten mängd av gel på toppen av cencorn
- Rikta censored mot undersökningsarean och tryck den *lätt* mot huden och tryck en gång på SCAN knappen för att starta skanningen
- Se på skärmen samtidig när du lutar och flyttar censor *långsamt* på huden
- När du se en bra kurva, tryck på SCAN igen för att stoppa scanningen

Kurvan star kvar på skarmen så länge du stänger av eller börjar en ny scanning genom att trycka SCAN igen

Käkhåla undersökning



Maxillary sinus

Pannhåla undersökning



Frontal sinus

Tolkning av kurvan:

Normal maxillary sinus: Indikation mellan 0 och 1,5 cm. Negativ indikation.

Sekret i maxillary sinus: Indikation mellan 3,5 och 6 cm. Positiv indikation.

Cysta eller polyp i maxillary sinus: Indikation mellan 2 och 3 cm. Positiv indikation.

Sekret i frontal sinus: Indikation mellan 1 och 3 cm. Positiv indication.

BARN: *Sekret* i maxillary sinus: Indikation mellan 2 och 4 cm. Positiv indication.

OBS! För fel indikation (*felt eco*), undvik att röra cencorn för nära ögonhålan samt för nära tänderna

Laddning av batteriet: Nominell laddningstid 14 h (dvs. batteriet helt utan laddning).

Gröna ljuset blinkar under laddningen, när batteriet är fullt laddat, lyser det gröna ljuset kontinuerligt. Batteriet kan inte överladdas, även om laddningen pågår längre än 14 h.

